


# 銳偵 家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑 使用說明書

防疫專案核准輸入第1106608063號 [型號] G69RHS D1

本說明書適用於 BIOCREDIT COVID -19 Ag Home Test Nasal，使用此檢測之前，請詳細閱讀使用說明。

## 一、使用前注意事項：清潔雙手，並確認產品內容物。

## 二、操作步驟：

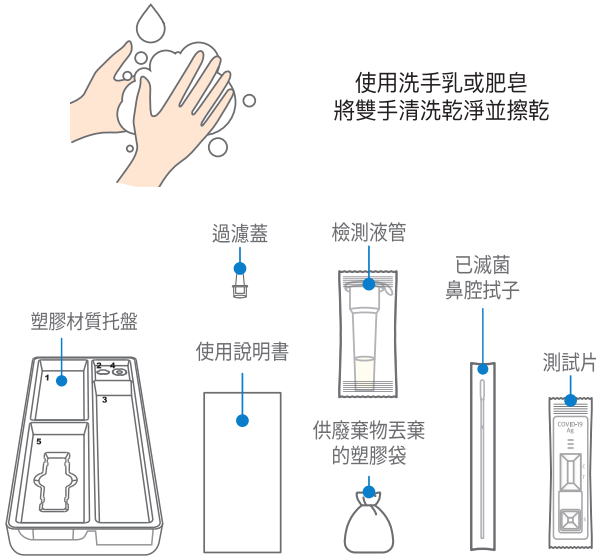

將產品中的所有內容物放在一平坦且乾燥的平面。

### 1 檢測前的準備

- 用紙巾輕輕擤鼻子 3 次以去除鼻中異物。
- 用肥皂或洗手液，徹底洗手並擦乾。
- 戴上手套，同時可準備計時器。

### 2 準備檢測液管

- 小心撕開鋁箔外包裝，取出檢測液管。
- 緩緩撕掉檢測液管上的鋁箔封膜，避免液體漏出。
- 將檢測液管置放到管固定孔 (2) 中。

### 3 用鼻腔拭子採樣

- 小心撕開已滅菌鼻腔拭子的外包裝，避免觸碰到拭子尖端。
- 將棉棒輕輕插入鼻孔中約 2 公分，對著鼻壁旋轉約 10 次，慢慢取出棉棒，對另一側鼻孔重複相同步驟。
- 將鼻腔拭子插入檢測液管中，輕輕旋轉約 10 次，在棉棒標示的斷點處折斷棉棒。

### 4 蓋上過濾蓋

- 將拭子尖端保留於管內，用過濾蓋蓋緊，勿將已組合的過濾蓋與檢測液管分開。
- 將已組合的過濾蓋與檢測液管置放到管固定孔 (2) 中。

### 5 測試片執行檢測

- 小心撕開測試片的鋁箔外包裝，取出測試片。
- 將採樣後的檢測液管輕輕反轉混合 10 次。
- 將 3 滴採樣後的檢測液滴入樣品孔 (S) 中，靜待約 15 到 30 分鐘後，即可判讀結果。

### ■ 使用範圍與用途

本產品為家用型檢驗試劑，利用側向流動原理，定性檢測疑似感染 COVID-19 患者自行採集之人類鼻腔體中存在的 SARS-CoV-2 核殼蛋白抗原。陽性結果並不能排除細菌感染或與其他病毒共同感染；陰性結果不能排除 SARS-CoV-2 感染。本檢測僅提供初步篩選結果。不應單以本產品檢驗結果作為病患管理之唯一依據。

### ■ 注意事項

- 本產品僅供體外檢測使用，不應單憑檢測結果作為感染與否的依據，須配合專業醫師諮詢來做判定。專業醫師的診斷將對本檢測結果做最終判定。
- 檢測結果如為陽性，請立即前往鄰近的社區採檢院所檢測，並依據中央疫情指揮中心規定執行相關防疫措施。
- 本產品僅評估 19 歲以上人員自行採檢結果，建議應由 19 歲以上人員使用。

## 三、結果判讀：

結果	圖示	判讀
陰性		結果視框中僅出現一條紅色的控制組線“C”。 [陰性結果，表示未發現SARS-CoV-2 抗原，但若出現 COVID-19 症狀且持續或變得更嚴重，請立即通報就醫。]
陽性		兩條線；結果視框中同時出現一條黑色測試組線“T”以及一條紅色的控制組線“C”。 [陽性結果，表示您的樣本中檢測到 COVID-19 病毒抗原，您應該立即執行自我隔離，並至臨近的醫療院所採檢，遵照中央疫情指揮中心實行相關防疫措施。] <b>* 即使測試線 (T) 是微弱的，也應判讀為陽性結果。</b>
無效		結果視框中沒有出現控制組線“C”，建議將此樣本重新進行檢測。 [無效結果，表示可能操作過程有錯誤或產品出現問題，導致結果無效，請立即檢查關於試劑盒的使用方法是否有誤，若有問題請務必聯繫購買處。]

## 四、廢棄物處理：將使用過的所有產品內容物集中至提供的塑膠袋中，依據檢測結果做不同處置。



若檢測結果為陰性，請將檢體及檢測裝置妥善密封放在塑膠處理袋中密封，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。

若檢測結果為陽性，需前往鄰近的社區採檢院所進行第二次檢測，並將本次自行檢測的檢體及檢測裝置妥善密封，交付篩檢站進行醫療廢棄物處理。



使用說明影片連結