


BIOCREDIT COVID-19 Ag

One Step SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

快篩盒提供之材料說明

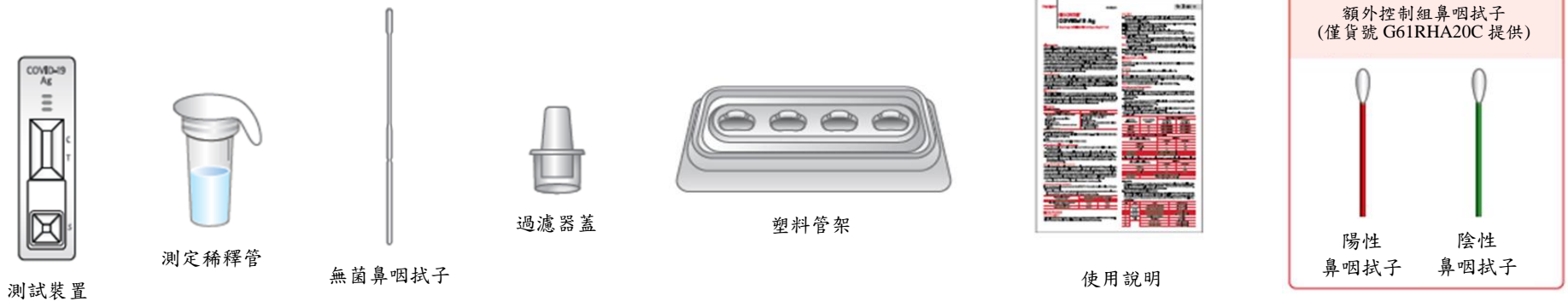


樣本採集



- 將患者的頭部稍微向後傾斜約 70 度
- 將鼻咽拭子水平插入鼻腔，直到在鼻甲水平遇到阻力，到達後鼻咽表面
- 此距離相當於從鼻孔到患者耳朵的距離，表示與鼻咽部有接觸
- 用棉籤輕輕摩擦並旋轉沾取鼻咽黏膜 10 - 15 秒以吸收分泌物
- 取出鼻咽拭子，同時確保鼻咽拭子尖端是濕的

檢測程序

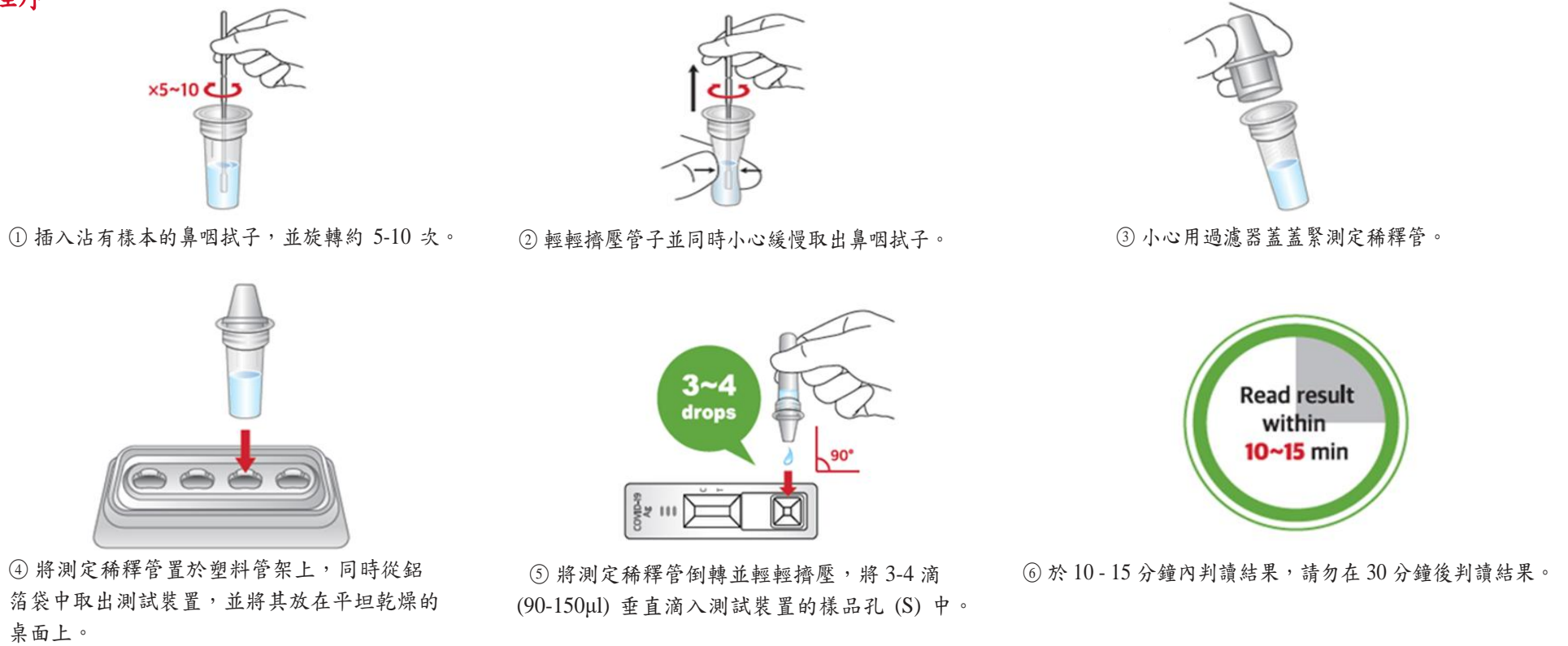

結果的判讀

