

結果判讀

	(沙門)	陽性
	(白念)	
	(沙門)	陰性
	(白念)	
	(沙門)	無效反應
	(白念)	
	(沙門)	
	(白念)	



(相關操作影片可掃QR code)

弘朗生物科技公司

<http://www.homerun-biotech.com/zh-tw/index.php>


電話：(06) 2307551

傳真：(06) 2307512

郵寄地址：台中市健行路郵局189號信箱

電子信箱：homerun.bio@gmail.com

沙門氏菌 & 白色念珠球菌 10分鐘快篩檢測 (鳥禽類)

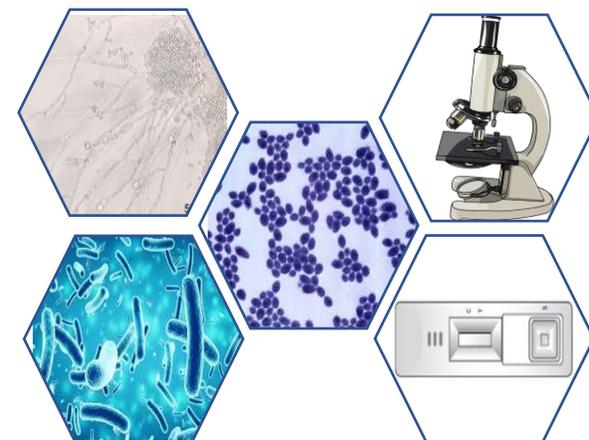

弘朗生物科技有限公司
HomeRun BioTech Inc.

鴿子出現了這些症狀嗎？

- A. **腸炎型**：消化慢，導致黏稠水樣綠色泥狀便。
- B. **關節炎型**：翅膀及腿部關節出現腫脹、發紅、疼痛情形，羽翼下垂或站立困難。
- C. **神經腦脊膜炎型**：運動協調性差、歪頭、斜頸、麻痺及癱瘓。



→ 可能需要《沙門氏菌快篩》

出現「鵝口瘡」，在口腔黏膜上出現乳白色或黃白色斑塊，觸感上嚙囊壁增厚，好發於賽前兩個月內。

嚙囊食滯積水、嘔吐、精神委頓、呆立閉眼、活動力下降、排咖啡或草綠泥狀便。




→ 可能需要《白色念珠球菌快篩》

◆沙門氏菌快篩檢測步驟

1. 將樣品處理液含有採樣棒的上蓋打開，利用採樣棒採集約 **50 mg** 的糞便。



2. 將含有採樣棒的上蓋蓋回樣品處理液的罐子，旋緊後**劇烈搖晃混合**。

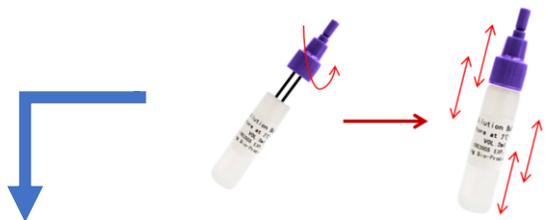

3. 自鋁箔袋中取出快篩試片，同時將紫色上蓋的頂端折開，



4. 將管中的**混合處理液滴3~4滴**至快篩試片上，**等10分鐘後**即可判讀。



◆白色念珠球菌快篩檢測步驟

1. 利用取樣棒採集檢體。




2. 滴**20滴**樣品處理液到小塑膠管中。



3. 將取樣棒放入小塑膠管中**旋轉15次**混勻，然後將取樣棒置於小塑膠管中**靜置2分鐘**，蓋上塑膠小管。



4. 自鋁箔袋中取出快篩試片，將小塑膠管中的**混合處理液滴3~4滴**至快篩試片上，**等15分鐘後**即可判讀。

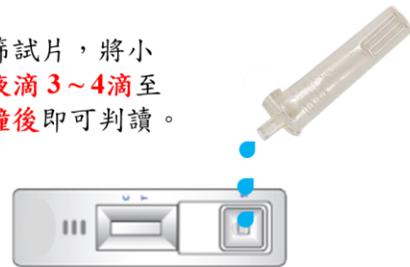

(結果請參照下頁)